

Éthylotest chimique Le Ballon 0,5 g/L — Contralco

Éthylotest à usage unique certifié NF · Lot de 50

CARACTÉRISTIQUES

Seuil de détection	0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré)
Certification	NF (homologué)
Réactif	Sans chrome — conforme REACH
Composition	Tube réactif + ballon gonflable + embout à clapet anti-retour
Lecture	Cristaux blancs : inférieur au seuil · cristaux rouges : seuil dépassé
Usage	Unique (jetable)
Poids unitaire	≈ 20 g
Fabricant	Contralco (fabrication française)

MODE D'EMPLOI (RÉSUMÉ)

- Attendre 10 minutes après la dernière consommation.
- Souffler dans le ballon jusqu'à gonflage complet.
- Faire passer l'air du ballon dans le tube et lire la couleur des cristaux.