

● DOSSIER TECHNIQUE COMPLET · SEPTEMBRE 2026

Toutes nos fiches techniques, en un document.

Les 11 dispositifs du catalogue : substances détectées, seuils en ng/mL, temps de lecture, conformité et mode d'emploi. À transmettre tel quel à votre service achats ou à votre préventeur.

11

fiches techniques, données fabricant

ng/mL

les seuils réels, pas des ordres de grandeur

0

formulaire pour les consulter à l'unité sur le site

24 h

pour un devis, réponse ouverte

SOMMAIRE

Les dispositifs de ce dossier

Autotest urinaire cannabis (THC) — boîte de 2

Capote2Verre — couvre-verre anti-drogue réutilisable

Test salivaire DrugWipe 6S — Securetec

Éthylotest chimique Le Ballon 0,2 g/L — Contralco

Éthylotest chimique Le Ballon 0,5 g/L — Contralco

Sticker anti-GHB — French Drink Guard (FDG)

Test salivaire multidrogues + alcool 6 classes — seuil bas

Test salivaire multidrogue 6 classes — seuil bas

Test salivaire multidrogue 6 classes — seuil haut

Test salivaire cannabis (THC) — seuil 15 ng/mL

Test urinaire multidrogue 6 classes

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation. Cette réserve vaut pour l'ensemble des dispositifs de ce dossier.

Autotest urinaire cannabis (THC) · boîte de 2

Autotest urinaire cannabis Medisur · immunoessai chromatographique rapide

50 ng/mL

5 min

30 min

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substance détectée	Cannabis (THC) — recherche des métabolites urinaires
Seuil de détection	50 ng/mL
Fenêtre de détection	De 30 minutes à 7 jours après la consommation — plus longue en cas d'usage régulier
Lecture	Résultat à 5 minutes
Prélèvement	Urinaire : recueil, puis immersion de la bandelette
Conditionnement	Boîte de 2 tests — le second permet de confirmer un premier résultat
Usage type	Autocontrôle par un particulier ou un salarié, avant une reprise de poste ou un contrôle annoncé
Portée du résultat	Un autotest est une orientation, non une preuve : seule une analyse de confirmation en laboratoire a une valeur probatoire
Marquage	CE

Fabricant

Medisur

MODE D'EMPLOI

En 4 étapes

01 Recueillir l'urine dans le godet.

02 Immerger la bandelette selon la notice.

03 Lire le résultat à 5 minutes.

04 En cas de doute, refaire le test avec la seconde bandelette de la boîte.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Capote2Verre · couvre-verre anti-drogue réutilisable

Protection de verre contre la soumission chimique

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Matériau	Silicone alimentaire — sans BPA
Réutilisation	Réutilisable durablement — lavable (main ou machine)
Compatibilité	S'adapte à la plupart des diamètres : verres à vin, cocktails, gobelets réutilisables
Utilisation	Ouverture pour paille + embout pour boire sans retirer la protection
Hygiène	Ne retient ni odeurs ni bactéries — rinçage simple
Emballage	Kraft recyclable à l'unité, notice incluse
Conditionnements	3, 10, 20 unités · boîtes pro 100 à 1 000 · présentoir 30
Marque	Capote2Verre® (France)

Données issues de la documentation fabricant (capote2verre.com). Document commercial non contractuel — se référer à la notice fournie avec le produit. Tactik Prévention, marque OUATE HEALTH.

En 3 étapes

01 Étirer la capote sur le verre plein.

02 Boire via l'embout ou une paille par l'ouverture centrale.

03 Rincer après usage pour réutiliser.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Test salivaire DrugWipe 6S · Securetec

6 familles de stupéfiants détectées en 5 minutes

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances détectées	Cannabis · Opiacés · Cocaïne · Amphétamines · Méthamphétamines · Benzodiazépines
Temps de résultat	5 minutes
Particularité	Seuils de détection très bas, y compris pour les benzodiazépines
Mise en œuvre	Sans analyseur — prélèvement salivaire hygiénique
Aide à l'usage	QR code sur l'emballage vers la vidéo d'utilisation
Référence terrain	Utilisé par la police irlandaise (Garda Síochána) depuis fin 2022
Fabricant	Securetec Detektions-Systeme AG

En 3 étapes

01 Prélever un échantillon de salive avec le collecteur.

02 Activer le test selon la notice.

03 Lire le résultat à 5 minutes.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Éthylotest chimique Le Ballon 0,2 g/L · Contralco

Version jeune conducteur / tolérance renforcée · certifié NF

0,2 g/L

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Seuil de détection	0,2 g/L de sang (jeunes conducteurs)
Certification	NF (homologué)
Réactif	Sans chrome — conforme REACH
Composition	Tube réactif + ballon gonflable + embout à clapet anti-retour
Lecture	Cristaux blancs : inférieur au seuil · cristaux rouges : seuil dépassé
Usage	Unique (jetable)
Fabricant	Contralco (fabrication française)

En 3 étapes

01 Attendre 10 minutes après la dernière consommation.

02 Souffler dans le ballon jusqu'à gonflage complet.

03 Faire passer l'air du ballon dans le tube et lire la couleur des cristaux.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Éthylotest chimique Le Ballon 0,5 g/L · Contralco

Éthylotest à usage unique certifié NF · Lot de 50

0,5 g/L

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Seuil de détection	0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré)
Certification	NF (homologué)
Réactif	Sans chrome — conforme REACH
Composition	Tube réactif + ballon gonflable + embout à clapet anti-retour
Lecture	Cristaux blancs : inférieur au seuil · cristaux rouges : seuil dépassé
Usage	Unique (jetable)
Poids unitaire	≈ 20 g
Fabricant	Contralco (fabrication française)

Données issues de la documentation fabricant (contralco.com). Document commercial non contractuel — se référer à la notice fournie avec le produit. Tactik Prévention, marque OUATE HEALTH.

En 3 étapes

01 Attendre 10 minutes après la dernière consommation.

02 Souffler dans le ballon jusqu'à gonflage complet.

03 Faire passer l'air du ballon dans le tube et lire la couleur des cristaux.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Sticker anti-GHB · French Drink Guard (FDG)

Protection de verre contre la soumission chimique · brevet français

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Principe	Sticker qui scelle le verre et ne laisse qu'un passage de paille — empêche l'introduction de substances à l'insu du consommateur
Adhésif	Colle de qualité alimentaire, enlevable
Matériau	Composition brevetée conforme aux normes agroalimentaires
Environnement	100 % recyclable
Compatibilité	S'adapte à la majorité des verres
Fabrication	Conception et production 100 % françaises
Usage	Unique — mise en place immédiate
Marque	French Drink Guard (FDG)

En 3 étapes

01 Coller le sticker sur les bords du verre plein.

02 Insérer une paille par l'ouverture centrale.

03 Jeter (recyclable) après usage — un sticker par verre.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Test salivaire multidrogues + alcool 6 classes · seuil bas

Dépistage salivaire 6 drogues + alcool en une opération · Medisur

6

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances & seuils

Cannabis 9-THC : 15 ng/mL · Cocaïne : 10 ng/mL · Opiacés (morphine) : 10 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines/MDMA : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 25 ng/mL

Alcool

Échelle 0 à 3 g/L — lecture 1 à 2 minutes

Lecture drogues

Négatif : 2 min · Positif : 10 min · validité max 20 min

Conformité

Seuils conformes Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16)

Conservation

+2 °C à +30 °C — ne pas congeler

Contenu

1 sachet aluminium : test + collecteur salivaire

Fabricant

Medisur

En 3 étapes

01 Prélever la salive avec le collecteur fourni.

02 Insérer le collecteur dans le dispositif.

03 Lire l'alcool à 1-2 min, les drogues à 2 min (négatif) / 10 min (positif).

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Test salivaire multidrogue 6 classes · seuil bas

Dépistage salivaire 6 familles, sensibilité maximale · Medisur

6

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances & seuils

Cannabis 9-THC : 15 ng/mL · Cocaïne : 10 ng/mL · Opiacés (morphine) : 10 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 25 ng/mL

Usage type

Seuil bas = sensibilité maximale, postes de sûreté et de sécurité

Lecture

Négatif : dès l'apparition des bandes C et T (à partir de 2 min) · Positif : 10 min · Ne pas lire après 20 min

Conformité

Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16) — dispositif avec n° unique d'identification

Conservation

+2 °C à +30 °C · ne pas congeler · utiliser dans l'heure après ouverture du sachet

Contenu

1 sachet aluminium : test + collecteur salivaire (185 × 70 × 20 mm)

Fabricant

Medisur

En 3 étapes

01 Prélever la salive avec le collecteur.

02 Insérer dans le dispositif.

03 Lire : négatif dès 2 min, positif à 10 min, jamais après 20 min.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Test salivaire multidrogue 6 classes · seuil haut

Dépistage salivaire 6 familles de stupéfiants · Medisur

96 %

6

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances & seuils

Cannabis 9-THC : 50 ng/mL · Cocaïne : 20 ng/mL · Opiacés : 40 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 30 ng/mL

Usage type

Seuil haut = ciblage des consommations récentes (prise de poste)

Lecture

Résultat rapide — négatif dès l'apparition des bandes, positif à 10 minutes

Fiabilité annoncée

96 % (fabricant)

Conformité

Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16) et arrêté du 13/12/16

Fabricant

Medisur

En 3 étapes

01 Prélever la salive avec le collecteur fourni.

02 Insérer dans le dispositif de lecture.

03 Lire le résultat selon la notice (négatif rapide, positif à 10 min).

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Test salivaire cannabis (THC) · seuil 15 ng/mL

Autotest salivaire cannabis Medisur · immunoessai chromatographique rapide

15 ng/mL

10 min

97,8 %

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substance détectée	Cannabis (9-THC) dans la salive
Seuil de détection	15 ng/mL — seuil de référence des forces de l'ordre
Fenêtre de détection	Consommation récente — en moyenne jusqu'à ~12 h pour un usage occasionnel (selon dose)
Fiabilité annoncée	97,8 % (fabricant)
Lecture	Négatif : dès l'apparition des 2 bandes · Positif : interprétation à 10 minutes
Prélèvement	Salivaire, non invasif, sans matériel de laboratoire
Conservation	+2 °C à +20 °C
Fabricant	Medisur

Données issues de la documentation fabricant (medisur.fr). Document commercial non contractuel — se référer à la notice fournie avec le produit. Tactik Prévention, marque OUATE HEALTH.

En 3 étapes

01 Prélever la salive avec le collecteur.

02 Insérer le collecteur dans le dispositif.

03 Lire : négatif dès 2 bandes visibles, positif à 10 minutes.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.

Test urinaire multidrogue 6 classes

Dépistage urinaire multi-substances · Medisur

5 min

99,9 %

6

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances & seuils

Cannabis (THC-COOH) : 50 ng/mL · Cocaïne : 300 ng/mL · Opiacés (héroïne) : 300 ng/mL · Amphétamines : 1000 ng/mL · Méthamphétamines : 1000 ng/mL · MDMA : 1000 ng/mL

Lecture

À 5 minutes — ne pas interpréter après 10 minutes

Fiabilité annoncée

99,9 % (fabricant)

Conformité

Seuils conformes à l'arrêté du 13 décembre 2016

Contrôle d'échantillon

Indicateur de température intégré (32-38 °C dans les 4 minutes)

Conservation

+2 °C à +30 °C · ne pas congeler

Contenu

Sachet aluminium : test avec capuchon + indicateur de température

Fabricant

Medisur

En 3 étapes

01 Recueillir l'échantillon d'urine.

02 Vérifier l'indicateur de température (authenticité de l'échantillon).

03 Lire le résultat à 5 minutes.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.