

Autotest urinaire cannabis (THC) · boîte de 2

Autotest urinaire cannabis Medisur · immunoessai chromatographique rapide

50 ng/mL

5 min

30 min

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substance détectée	Cannabis (THC) — recherche des métabolites urinaires
Seuil de détection	50 ng/mL
Fenêtre de détection	De 30 minutes à 7 jours après la consommation — plus longue en cas d'usage régulier
Lecture	Résultat à 5 minutes
Prélèvement	Urinaire : recueil, puis immersion de la bandelette
Conditionnement	Boîte de 2 tests — le second permet de confirmer un premier résultat
Usage type	Autocontrôle par un particulier ou un salarié, avant une reprise de poste ou un contrôle annoncé
Portée du résultat	Un autotest est une orientation, non une preuve : seule une analyse de confirmation en laboratoire a une valeur probatoire
Marquage	CE

Fabricant

Medisur

MODE D'EMPLOI

En 4 étapes

01 Recueillir l'urine dans le godet.

02 Immerger la bandelette selon la notice.

03 Lire le résultat à 5 minutes.

04 En cas de doute, refaire le test avec la seconde bandelette de la boîte.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.