

Éthylotest chimique Le Ballon 0,5 g/L · Contralco

Éthylotest à usage unique certifié NF · Lot de 50

0,5 g/L

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Seuil de détection	0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré)
Certification	NF (homologué)
Réactif	Sans chrome — conforme REACH
Composition	Tube réactif + ballon gonflable + embout à clapet anti-retour
Lecture	Cristaux blancs : inférieur au seuil · cristaux rouges : seuil dépassé
Usage	Unique (jetable)
Poids unitaire	≈ 20 g
Fabricant	Contralco (fabrication française)

En 3 étapes

01 Attendre 10 minutes après la dernière consommation.

02 Souffler dans le ballon jusqu'à gonflage complet.

03 Faire passer l'air du ballon dans le tube et lire la couleur des cristaux.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.