

Test salivaire multidrogues + alcool 6 classes · seuil bas

Dépistage salivaire 6 drogues + alcool en une opération · Medisur

6

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances & seuils

Cannabis 9-THC : 15 ng/mL · Cocaïne : 10 ng/mL · Opiacés (morphine) : 10 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines/MDMA : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 25 ng/mL

Alcool

Échelle 0 à 3 g/L — lecture 1 à 2 minutes

Lecture drogues

Négatif : 2 min · Positif : 10 min · validité max 20 min

Conformité

Seuils conformes Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16)

Conservation

+2 °C à +30 °C — ne pas congeler

Contenu

1 sachet aluminium : test + collecteur salivaire

Fabricant

Medisur

En 3 étapes

01 Prélever la salive avec le collecteur fourni.

02 Insérer le collecteur dans le dispositif.

03 Lire l'alcool à 1-2 min, les drogues à 2 min (négatif) / 10 min (positif).

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.