

Test salivaire multidrogue 6 classes · seuil bas

Dépistage salivaire 6 familles, sensibilité maximale · Medisur

6

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances & seuils

Cannabis 9-THC : 15 ng/mL · Cocaïne : 10 ng/mL · Opiacés (morphine) : 10 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 25 ng/mL

Usage type

Seuil bas = sensibilité maximale, postes de sûreté et de sécurité

Lecture

Négatif : dès l'apparition des bandes C et T (à partir de 2 min) · Positif : 10 min · Ne pas lire après 20 min

Conformité

Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16) — dispositif avec n° unique d'identification

Conservation

+2 °C à +30 °C · ne pas congeler · utiliser dans l'heure après ouverture du sachet

Contenu

1 sachet aluminium : test + collecteur salivaire (185 × 70 × 20 mm)

Fabricant

Medisur

En 3 étapes

01 Prélever la salive avec le collecteur.

02 Insérer dans le dispositif.

03 Lire : négatif dès 2 min, positif à 10 min, jamais après 20 min.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.